

Genu Syncro ACL

Art nr: S750

Helt unik led som förhindrar främre subluxation av tibia.

Indikation: Konservativ behandling av ACL-skada

Material: Extremt lätt ortos, 360gr. Led av aluminium och mjukdelset av neopren klädd med sämskskinn.

Funktion:

Från 40 graders flexion upptill 0 graders extension börjar ledens axelpunkt förflytta sig ned längs tibiadelen på ortosen. Detta leder till en parallell förskjutning framåt av lårdelen i förhållande till tibiadelen. Den här funktionen ger ett nödvändigt tryck för att förhindra främre subluxation av tibia.

Trycket för att förhindra subluxation kommer att öka från 40 graders flexion till 0 graders extension.

Utprovning:

1: Justera leden genom skränkning/bockning så att leden följer exakt patientens konturer.


2: Knät ska vara i ca. 70-90 graders flexion under utprovning (patienten sittande på en stol). Lägg leden så att justeringspunkten hamnar mitt för ledspringan.

Det är den punkt som är markerad på bild och ska vara centrerad mot ledspringan vid 70-90 graders flexion.

3: Justera de främre kardborrefästena först. Sedan de bakre.

4: Patienten ska inte öppna de främre banden. Ta på och av ortosen med hjälp av de bakre banden.

Förvara alltid ortosen med knäppta velcrobånd. Om det fastnar trådar i hårda delen av bandet går det lätt att kamma bort dessa

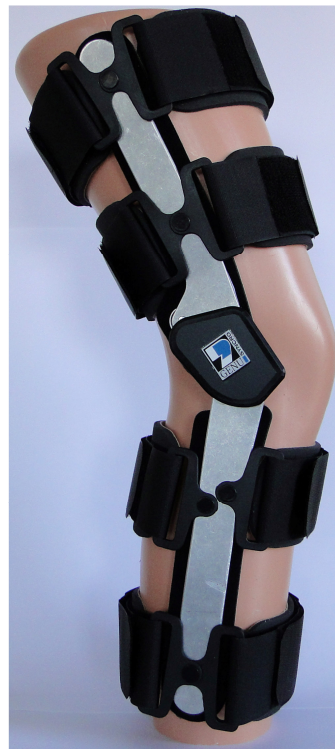

Storlekstabell:	Small	Medium	Large
Mät omkretsen			
20 cm ovanför knät:	38-48	46-56	54-64
7 cm nedanför knät:	28-34	34-42	42-50

Tvättanvisning: Demontera velcrobånd innan tvättning. Handtvätta velcrobänden i 30 grader, mild tvålsvatten. Låt materialet självtorka.

Din leverantör av ortopediska hjälpmedel

Mediband AB
Box 95
Se-131 07 Nacka
Sweden

Tfn: +46 8 716 25 15
Fax: +46 8 718 46 38
www.mediband.se
info@mediband.se