

# GILOFA®

Det rätta sättet att ta hand om dina Gilofa stödstrumpor.



30 grader fintvätt



Ej blekning



Torktumling tillåten



Ej strykning



Ej kemtvätt

## Tvätt

- **Tvättas ut och in!**
- **Tvätta före första användningen!**
- Om möjligt, tvätta efter varje dags användning (max. 30 ° C), minst varannan dag
- Använd mildt rengöringsmedel. Använd inte sköljmedel
- Skölj väl, gnugga eller vrid inte
- Lufttorka på en handduk eller i lätt ventrifugering (fintvätt programmet)

## Skötsel

- Förvaras torrt, skyddat mot direkt solljus
- Undvik att strumpor med silikon belagda grepp är i kontakt med lösningsmedel, krämer och fuktgivande flytande tvål, eftersom vidhäftningen kan drabbas
- Upprätthålla regelbunden fotvård och använd bra skor
- Noppor är normalt för textilier och ingen anledning till reklamation