

# Jura Walkers




Jura Air Shield Walker



Jura ROM Walker



Jura Fixed Walker

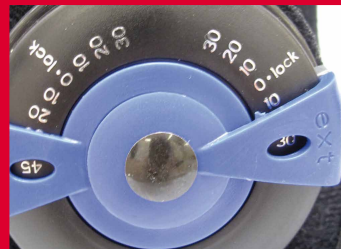

Distribueras i Sverige av

Mediband AB  
www.mediband.se

info@mediband.se  
tfn: 08-7162515

mediband 




En produkt från Jura Medical




# Jura Walkers

## Användarbeskrivning


### Jura Air Shield Walker

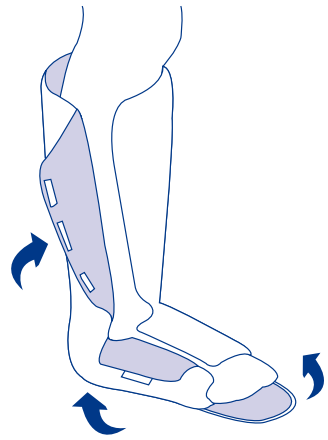


Vid utprovning av walkern första gången öppna alla banden och lyft ur fodret.

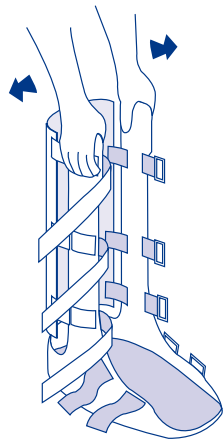


Sätt tillbaka fodret, se till att häldelen kommer väl på plats i walkern

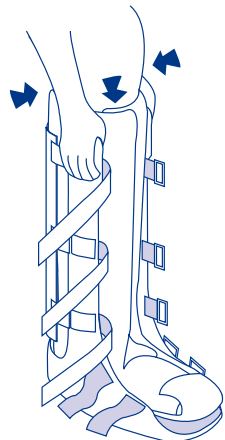


Se till att fodret fäster i velcron på walkerns foddel och skänklarna på underbenet och att det inte uppstår veck.

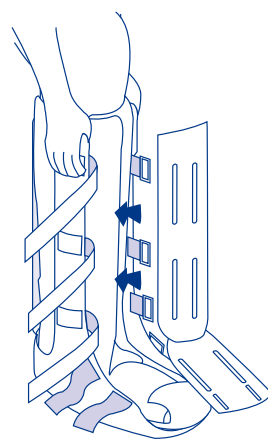

Fixera frontdelen

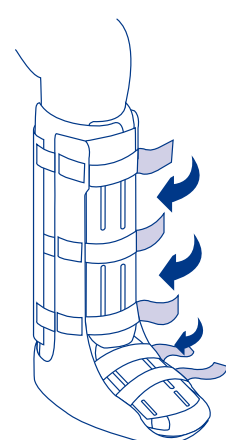

Fäst banden, börja vid tårna. Se till att banden sitter ordentligt fast men inte för hårt.

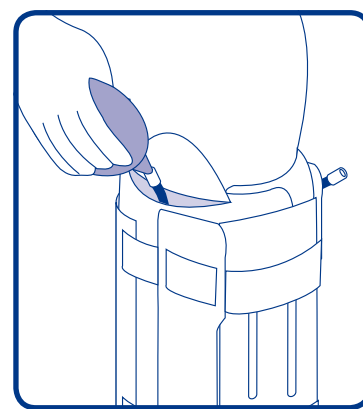

- Använd den medföljande handpumpen.
- Välj rätt sida av pumpen som är märkt IN för att pumpa in luft i luftcellen och OUT för att tömma luftcellen.
- Tryck in pumpen ordentligt i ventilen som finns både medialt samt lateralt.
- Pumpa till önskat tryck och kontrollera med patienten att det blir stadigt men inte för hårt.
- Luftcellerna bör tömmas på luft varje gång man tar ur foten ur walkern och skall applicera på nytt.

Efter att walkern blivit utprovad

Att ta av walkern:


- Öppna alla band och ta bort frontdelen

Att sätta på walkern:


- Sätt ner foten i fodret, se till att hälen är på plats ordentligt.
- Stäng fodret ordentligt.
- Fixera frontdelen

- Fäst banden, börja vid tårna. Se till att banden sitter ordentligt fast men inte för hårt.

### Jura ROM Walker

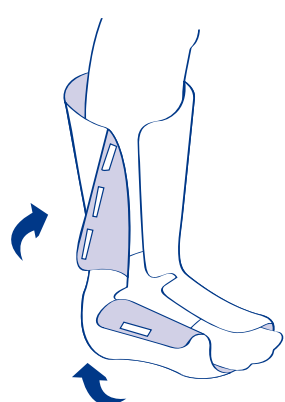


Vid utprovning av walkern första gången öppna alla banden och lyft ur fodret.

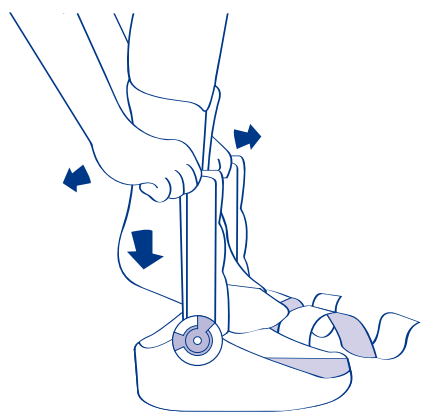


Sätt tillbaka fodret, se till att häldelen kommer väl på plats i walkern. Se till att fodret fäster i velcron på walkerns

foddel och skänklarna på underbenet och att det inte uppstår veck.

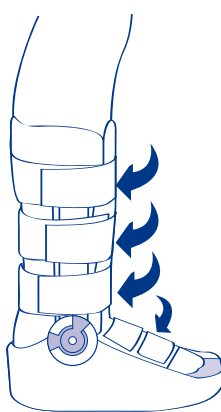

Fäst banden, börja vid tårna. Se till att banden sitter ordentligt fast men inte för hårt

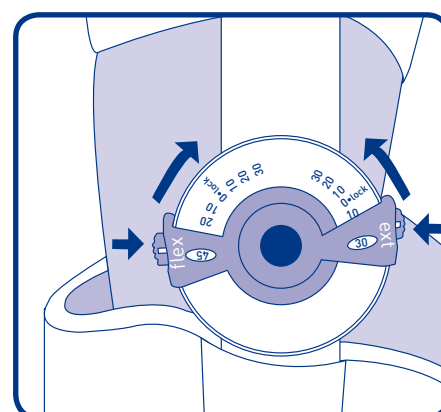

Inställningsanvisningar för den ledade walkern.

- Tryck och håll inne flektion- resp. extension spärren och vrid över gradskalan till önskad inställning.
- Möjlighet att låsa inställningen finns genom att använda medföljande låsband.

Efter att walkern blivit utprovad

Att ta av walkern:


- Öppna alla band och ta bort frontdelen

Att sätta på walkern:


- Sätt ner foten i fodret, se till att hälen är på plats ordentligt.
- Stäng fodret ordentligt.

- Fixera frontdelen
- Fäst banden, börja vid tårna. Se till att banden sitter ordentligt fast men inte för hårt.


### Jura Fixed Walker

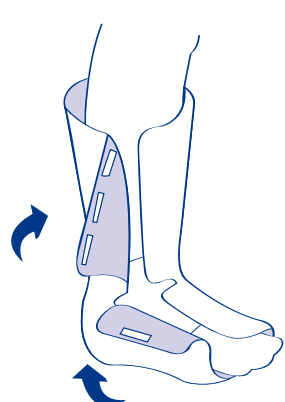


Vid utprovning av walkern första gången öppna alla banden och lyft ur fodret.

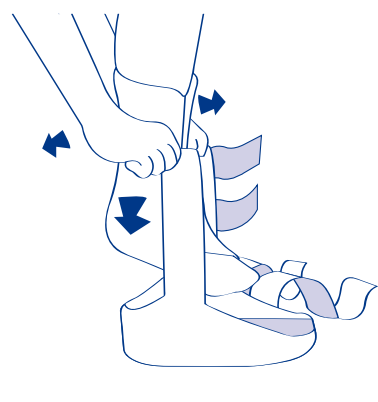

Sätt tillbaka fodret, se till att häldelen kommer väl på plats i walkern

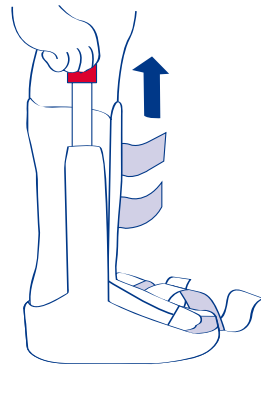

När placeringen av fodret mellan skänklarna är korrekt, drar man i den röda bandfliken (märkt PULL-UP) och frigör på detta sätt velcron som håller fodret på plats i walkern.

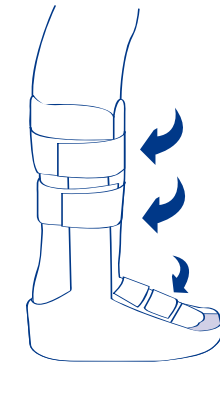

Fäst banden, börja vid tårna. Se till att banden sitter ordentligt fast men inte för hårt

Efter att walkern blivit utprovad

Att ta av walkern:

- Öppna alla band och ta bort frontdelen.

Att sätta på walkern:


- Sätt ner foten i fodret, se till att hälen är på plats ordentligt.
- Stäng fodret ordentligt.

- Fixera frontdelen
- Fäst banden, börja vid tårna. Se till att banden sitter ordentligt fast men inte för hårt.

### Air liner

Finns som alternativ Rom och Fixed Walker.

Air liner provas ut på samma sätt som en standard liner

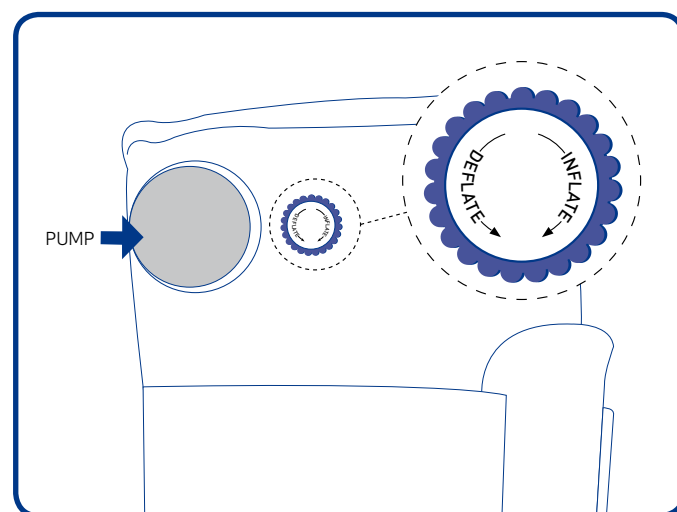

För att pumpa upp liner med luftkuddar, vrid knappen till "inflate" och pumpa med den grå pumpen.

För att ta ut luft, vrid knappen till "deflate" och tryck ut luften ur kuddarna.



#### Varning:

- Denna ortos bör provas ut av professionell vårdpersonal
- Läs användarinstruktionerna noggrant.

- Skulle du uppleva problem med ortosen, kontakta din utprovare. Tex. ökad smärta, svullnad eller stickningar i foten

- Var noga med att följa alla anvisningar och instruktioner du får av din utprovare och annan vårdpersonal. Detta är en viktig del av din rehabilitering

